

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, UŻYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI IXION

1. Przed czyszczeniem i sterylizacją narzędzia należy wyjąć z opakowań. Detergenty zasadowe i kwasowe mogą uszkodzić kleszcze. Należy zawsze używać detergentów lub roztworów z neutralnym pH. Temperatura sterylizacji nie może przekraczać 160° C.

2. Dostarczane narzędzia nie są sterylne i muszą zostać wysterylizowane zgodnie z poniższymi instrukcjami.

3. Ręczne czyszczenie

Trzeba dokładnie wyczyścić wszystkie powierzchnie i złącza szczoteczką, używając neutralnego środka myjącego. Przemycać czystą bieżącą wodą przez 3 minuty. W razie konieczności cały proces należy powtórzyć. Osuszyć kleszcze papierowym ręcznikiem.

4. Automatyczne czyszczenie

Należy używać wyłącznie autoryzowanych urządzeń myjących i autoryzowanych środków myjących. Po wyjęciu kleszczy z urządzeń myjących należy sprawdzić, czy są czyste i w razie konieczności powtórzyć cały cykl. Należy sprawdzić, czy występują ślady korozji lub uszkodzenia. Na powierzchniach tnących nie może być żadnych uszkodzeń i należy się upewnić, że wyjmowane końcówki są bezpiecznie umocowane. Przed sterylizacją należy zawsze nasmarować złącza i zawiasy olejem, który jest także dostępny w firmie Ixion.



Uwaga: Pozostawienie mokrych kleszczy może spowodować ich korozję. Przyrządy należy osuszyć papierowym ręcznikiem lub strumieniem gorącego powietrza o temperaturze maksymalnie 160° C.

5. Sterylizacja


Narzędzia należy umieścić na perforowanych tacach lub zwykłych tacach do sterylizacji, upewniając się, że powierzchnie tnące nie dotykają tacy, aby uniknąć ich uszkodzenia. Sterylizując więcej niż jedną parę kleszczy, należy zwrócić uwagę na to, aby narzędzia nie stykały się ze sobą, ponieważ mogłoby to doprowadzić do ich uszkodzenia lub korozji.

Do sterylizacji zapakowanych narzędzi zaleca się stosowanie tylko autoryzowanych autoklawów sterylizujących próżnią wstępną. Autoklawy wykorzystujące tylko próżnię po sterylizacji nie są odpowiednie do czyszczenia zapakowanych przyrządów.

Nie należy przekraczać temperatury 160° C ani maksymalnego obciążenia podanego przez producenta.

6. Dodatkowe informacje

Dopuszczalne jest stosowanie autoryzowanych myjek ultradźwiękowych z autoryzowanymi środkami czyszczącymi. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów tych urządzeń i środków czyszczących.

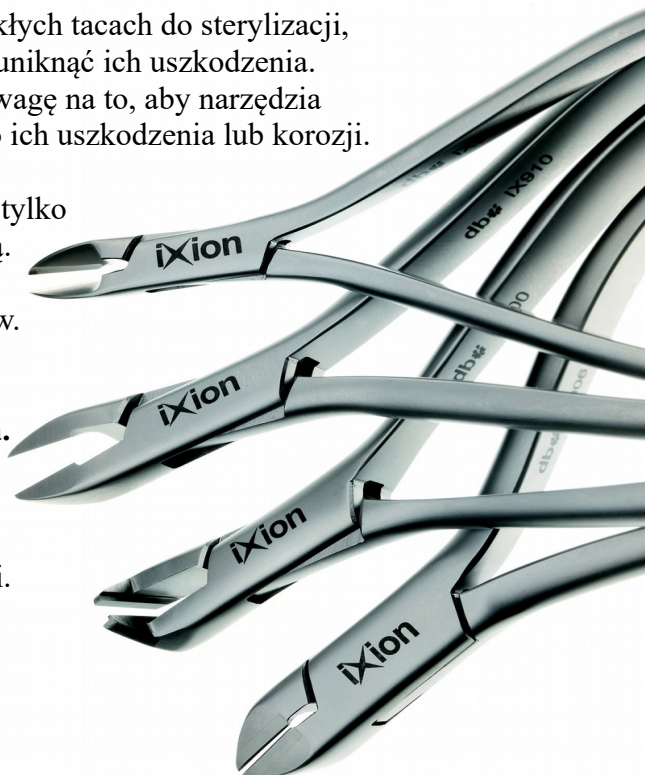

Gwarancja i naprawa

1. Narzędzia Ixion są objęte pięcioletnią gwarancją w zakresie wad produkcyjnych. Ta gwarancja obejmuje złamania i uszkodzenia złączy przy właściwym używaniu przyrządów. Niewłaściwe używanie, nadużywanie lub niewłaściwa konserwacja kleszczy wykluczają roszczenia gwarancyjne.

Uwaga:

Zawiasy pudełkowe należy nasmarować przed sterylizacją smarem klasy medycznej. Papierowym ręcznikiem należy usunąć wszelkie pozostałości oleju.

Co 8-9 miesięcy należy gruntownie przeczyścić i nasmarować zawiasy pudełkowe kleszczy.

2. W przypadku zgłoszenia wad odpowiedzialność DB ogranicza się, według uznania DB, wyłącznie do naprawy lub wymiany kleszczy bądź zwrotu ich kosztów.

3. W ciągu roku od zakupu narzędzi Ixion, firma DB bezpłatnie naostrzy wszelkie stępione ostrza, które nie będą odpowiednio cięte.

4. Postępowanie zgodnie z zalecanymi instrukcjami czyszczenia, sterylizacji i smarowania pomoże w utrzymaniu przyrządów w odpowiedniej kondycji.

5. Często używane kleszcze tnące należy regularnie poddawać regeneracji.

6. Gwarancja nie obejmuje rutynowej konserwacji, ostrzenia, naprawy niewielkich uszkodzeń ostrza ani regeneracji. Roszczenia gwarancyjne i zgłoszenia serwisowe należy kierować do lokalnego dystrybutora.

UWAGA!!!

Kleszcze wysyłane do reklamacji muszą być sterylne!

W przypadku przysłania narzędzi niesterylnych, czas reklamacji zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Kontakt z dystrybutorem w Polsce:

Orto Trading Tomasz Włodarczyk
ul. Husarii 11B, 02-951 Warszawa
tel. 22 651-84-09, kom. 795-423-558
email: biuro@ortotrading.com.pl
www.ortotrading.com.pl