



WE
CARE
ENAMEL



DENTA
SONIC

Bezpieczny
Inteligentny
Delikatny
Efektywny
Wygodny
Precyzyjny

System narzędzi i
akcesoriów do strippingu



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Orto Trading, ul. Husarii 11B, 02-951 Warszawa

tel. 22 651-84-09; 604-593-940

email: biuro@ortotrading.com.pl

www.ortotrading.com.pl

Jak zaplanować stripping dla potrzeb ortodontycji?

Wskazania do kontrolowanego i minimalnie inwazyjnego strippingu:

- słabo nasilone i umiarkowane stłoczenie,
- dyskrepancja Boltona,
- zmniejszenie mezialnej inklinacji zębów bocznych w szczęcie, gdy odpowiadają one za występowanie klasy II,
- modyfikacja punktów styecznych w celu prewencji wznowy zaburzenia zgryzu,
- kontrola nawrotu,
- czarne trójkąty,
- rekonturing dla potrzeb estetycznych.



Sugestia: w celu łatwiejszego zniesienia punktu styecznego należy najpierw włożyć klin, znieść 0,08 do 0,1 mm szkliwa za pomocą DiaStrip, a następnie poszerzyć przestrzeń międzyzębową do 0,2, 0,3 mm itd., w porządku wstępującym, aż do pożądanej wielkości.

* W zależności od sytuacji klinicznej można szlifować oba zęby sąsiednie lub pojedynczy ząb.

* W celu korekty powierzchni szkliwa należy przesuwac pasek do przodu i do tyłu z niewielkim uciskiem w kierunku pionowym.

W przeciwieństwie do ekstrakcji, gdzie otrzymujemy dużą przestrzeń, wybór strippingu daje możliwość wytworzenie małych szpar powstałych dzięki zeszlifowaniu szkliwa w kilku miejscach.

Dlatego zasadą interproksymalnej redukcji szkliwa (IRS) jest wykonanie zabiegu na kilku wizytach: po pierwsze opracowuje się łatwiej dostępne punkty styeczne, a po drugie – stopniowo zwiększa się ilość miejsca w miarę jak rozładowywane jest stłoczenie.

Płaskie powierzchnie styeczne pomagają zapobiegać czy to nawrotom wady, czy też powstawaniu czarnych trójkątów.



Zestawy startowe



Basic Set

Zestaw podstawowy

Numer katalogowy: DSG4A-204



Zestaw zawiera:

- paski/piłki dwustronne (1xDSS-01, 1x DSS-02, 1xDSM-03, 1xDSM-04 1xRDS-05, 1xRPS-15)
- kątnica oscylacyjna DentaSonic 4:1 z wewnętrznym chłodzeniem wodą
- szczelinomierz, 6 grubości blaszek
 - 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm
- element do wyciskania pasków i konserwacji kątnicy
- instrukcja, karta gwarancyjna 12 miesięcy

Prawidłowy montaż piłek/pasków



Zestawy startowe



Cicha praca końcówki.

Bez wibracji.



Professional Kit 2

Numer katalogowy: DSPK2-1Y

1 dodatkowa
główka
oscylacyjna

+



Zestaw zawiera:

- 6 szt. piłek/pasków dwustronnych (1xDSS-01, 1xDSS-02, 1xDSM-03, 1xDSM-04, 1xRDS-04, 1xRDS-05 mm)
- 6 szt. piłek/pasków jednostronnych (1xDSS-005, 1xDSM-01, 1xDSM-02, 1xDSM-03, 1xRDS-009, 1xRDS-010 mm)
- 6 szt. pasków polerujących (3xRPS-9, 3xRPS-15)
- kątnica oscylacyjna DentaSonic 4:1 z wewnętrznym chłodzeniem wodą
- dodatkowa główka oscylacyjna do kątnicy
- 4 szt. wiertel do debondingu (2xDB-R20 Cup, 2xDBR21 Point)
- szczelinomierz, 6 grubości blaszek (0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm)
- stojak do sterylizacji
- element do wypychania pasków i konserwacji kątnicy
- 2 szt. pasków ręcznych
- pasta do zębów BioMin Remineralization
- instrukcja, gwarancja 12 miesięcy





New Diamond Strips

 **DiaStrip**

DiaStrip – paski z nasypem diamentowym do kątницы oscylacyjnej.

DiaStrip to metalowe paski pokryte jedno- lub dwustronnie nasypem diamentowym. Przeznaczone do mało inwazyjnych procedur interproksymalnej redukcji szkliwa w leczeniu aparatami stałymi i alignerami.

DiaStrip są:

- precyzyjne – mają dokładnie określoną grubość każdego paska,
- pokryte jedno- lub dwustronnie nasypem diamentowym o ziarnach 15, 25, 40 i 60 μm ,
- współpracują z końcówkami oscylacyjnymi takich firm, jak: DentaSonic, W&H, Kavo, NSK, Morita.

Wskazania:

- znoszenie międzyzębowych punktów styčných,
- poszerzanie przestrzeni międzyzębowych poprzez obustronną redukcję rozmiaru zęba,
- korekta szerokości zębów w fazie finiszingu,
- obustronne polerowanie powierzchni szkliwa.




KORZYŚCI:

- 1** bezpieczne i komfortowe dla pacjentów,
- 2** skuteczne i precyzyjne w działaniu,
- 3** nie przecinają policzków czy warg i nie powodują zakrzuszenia,
- 4** dokładnie opracowują krzywizny zęba, bez schodków poddziąsłowych czy ostrych krawędzi,
- 5** wielokrotnego użytku, można je sterylizować w autoklawie do temperatury 135°C (sterylizacja parowa, nie sucha).

DiaStrip

Paski do jedno- lub obustronnej redukcji szkliwa na powierzchniach stycznych oraz do polerowania zębów/wypełnień. Stosowane w ortodoncji i stomatologii.

Paski
dwustronne

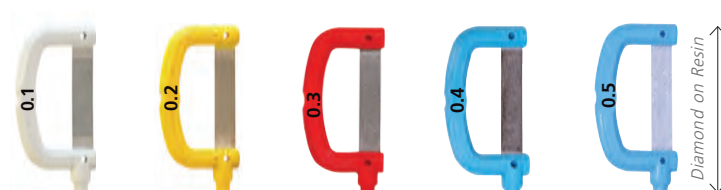

Pakowane po 5 szt.

dwustronne	DiaStrip				Resin DiaStrip
Stary numer kat.	DSM-15	DSM-25	DSM-40	DSM-60	
Nowy numer kat.	DSM-01	DSM-02	DSM-03	DSM-04	RDS-05
Grubość paska:	☐ 0.1mm	☐ 0.2mm	☐ 0.3mm	☐ 0.4mm	☐ 0.5mm
Thickness= +/- 0.03mm					

Paski
jednostronne



Pakowane po 5 szt.

jednostronne	DiaStrip		
Stary numer kat.	DSM1-15	DSM1-25	DSM1-40
Nowy numer kat.	DSM-01L	DSM-02L	DSM-03L
Nowy numer kat.	DSM-01R	DSM-02R	DSM-03R
Grubość paska:	☐ 0.1mm	☐ 0.2mm	☐ 0.3mm
Thickness= +/- 0.03mm			

DiaSaw

Piłki z diamentowym nasypem, do obustronnego znoszenia punktów stycznych w redukcji rozmiaru zęba. Przydatne w leczeniu ortodontycznym.

Piłki jedno- i
dwustronne

Pakowane po 5 szt.



	DiaSaw	1 side DiaSaw		2 sides DiaSaw	
Numer kat.	DSS-1	DSS-005L	DSS-005R	DSS-01	DSS-02
Grubość pilki	☐ 0.05mm	☐ 0.05mm	☐ 0.05mm	☐ 0.1mm	☐ 0.2mm
	bez nasypu	jednostronne	jednostronne	dwustronne	dwustronne

DiaBee

Oscylujące narzędzie z diamentowym nasypem do obustronnej redukcji szkliwa na powierzchniach stycznych & do polerowania zębów/wypełnień.

Paski
perforowane
dwustronne

Pakowane po 5 szt.



	DiaPlaque	2 sides DiaBee			
Numer kat.	DP-1	DSB-15	DSB-25	DSB-40	DSB-60
Grubość paska	☐ 0.05mm	☐ 0.1mm	☐ 0.2mm	☐ 0.25mm	☐ 0.3mm
Grubość nasypu	bez nasypu	15 µm	25 µm	40 µm	60 µm



ErgoStrip

New Diamond Strips

ErgoStrip – paski z nasypem diamentowym do szlifowania ręcznego.

ErgoStrip to nowe rozwiązanie dla potrzeb ortodoncji, stomatologii zachowawczej (odbudowy), protetyki (licówki), profilaktyki.

Stosowane przy odbudowach

Służy do szybkiego, bezpiecznego i prostego oczyszczania powierzchni po zacementowaniu koron, licówek, mostów, inlei czy onlei.

Wystarczy wybrać właściwy pasek, aby wygładzić odbudowę. Nowy kształt narzędzia zapobiega drażnieniu tkanek miękkich, a unikalna rękojeść pozwala na bezpieczne uchwycenie narzędzia, z pełną kontrolą dotykową. Dzięki temu mamy łatwiejszy dostęp do powierzchni styčných zębów.

Stosowane w ortodoncji

Innowacyjne narzędzie do redukcji interpoksymalnej, które czyni tę ostatnią bezpieczną i pozwala ją dokładnie wykonać, bez ostrych kantów. Zaprojektowane do wspierania działań alignerów dostępnych na rynku. Zakrzywione i giętkie paski podążają w ślad za naturalnym konturem zęba, co pozwala uniknąć zarówno podrażnienia tkanek miękkich, jak i wykonania podcieni w szkliwie oraz zwiększa komfort pacjenta. Najlepsze efekty daje przesuwanie paska w przód i w tył, delikatnie i tylko w kierunku policzkowo językowym.



Obustronne uchwyty pozwalają wygodnie trzymać narzędzie, co ułatwia kontrolę nacisku i kierunku prowadzenia paska.


KORZYŚCI:

- 1** obustronny uchwyt zapewnia dobrą kontrolę dotykową,
- 2** łatwy dostęp do ciasnych przestrzeni międzyzębowych w odcinku przednim lub bocznym,
- 3** nie przecinają policzków czy warg, nie powodują zakrztuszenia,
- 4** giętki pasek dokładnie opracowuje krzywizny zęba, bez schodków podziałowych czy ostrych krawędzi,
- 5** wielokrotnego użytku, można je sterylizować w autoklawie do temperatury 135°C (sterylizacja parowa, nie sucha).



ErgoStrip

Paski ręczne
dwustronne

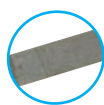


	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip
Numer kat.	ESM-15	ESM-25	ESM-40	ESM-60
Grubość nasypu	15 µm	25 µm	40 µm	60 µm
Grubość paska	0.10mm	0.15mm	0.20mm	0.30mm



	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip	ErgoStrip
Numer kat.	ESM1-15	ESM1-25	ESM1-40	ESM1-60
Grubość nasypu	15µm	25µm	40µm	60µm
Grubość paska	0,08 mm	0,10 mm	0,15 mm	0,20 mm

ErgoSaw

Piłki ręczne
dwustronne

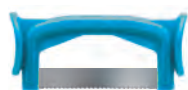

	ErgoStrip Saw	ErgoStrip Saw	ErgoStrip Saw	ErgoStrip Saw
Numer kat.	ESS-1	ESS-15	ESS-25	ESS-40
Grubość nasypu	bez nasypu	15 µm	25 µm	40 µm
Grubość paska	0.05m	0.1mm	0.15mm	0.20mm

do wyczerpania zapasów

ErgoBee

Paski ręczne perforowane
dwustronne



Numer kat.
Grubość nasypu
Grubość paska



	ErgoPlaque	ErgoBee	ErgoBee	ErgoBee	ErgoBee
Numer kat.	EP-1	ESB-15	ESB-25	ESB-40	ESB-60
Grubość nasypu	bez nasypu	15 µm	25 µm	40 µm	60 µm
Grubość paska	0.05mm	0.08mm	0.12mm	0.17mm	0.25mm


do wyczerpania zapasów

Stojak do sterylizacji

Wykonany ze stali nierdzewnej INOX z miejscem na 6 elementów*

Numer kat.	ST-6
	1 szt.

* Produkt na zamówienie.

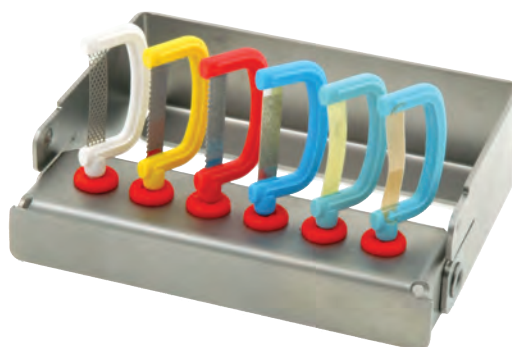

Szczelinomierz

Wykonany ze stali nierdzewnej, składa się z 6 blaszek.
Służy do kontrolowania wielkości szczelin międzyczębowych.
Nadaje się do sterylizacji.



Numer kat.	MG-6
Grubość	0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
	1 szt.

Możliwe ustawienia grubości
szczelinomierza
od 0.1mm do 1.65mm

0.1,	
0.15, and	0.25
0.2,	0.35
0.3,	0.45
0.4,	0.55
0.5,	0.65 – 1.05 – 1.35 – 1.55 – 1.65



Zestaw do debondingu

Pozwala bezpiecznie zdejmować zamki lub inne zaczepy bez ryzyka uszkodzenia przyrządów szklanych. Resztki materiału adhezyjnego można usunąć metodą ekonomiczną i bardzo bezpieczną w porównaniu z wiertłem diamentowym czy innymi instrumentami metalowymi. Używanie tych ostatnich zawsze niesie ryzyko uszkodzenia zęba. W naszym systemie ryzyko to jest wyeliminowane dzięki zaimpregnowanej twardości nasypu ściernego. Taki mikronasyp jest zatopiony w gumowej matrycy. Instrument umożliwia pozbycie się resztek materiału adhezyjnego w kilka minut.



	Zestaw do debondingu
Numer kat.	DB-SE6
Kształt	mix
Ilość	6
Sterylizacja	tak

	Zestaw do debondingu
Numer kat.	DB-S6
Kształt	mix
Ilość	6
Sterylizacja	tak



DENTASONIC

DS DENTASONIC SA Via
Piodella 12 Tel. +41 91 600 19 60
CH-6933 Muzzano info@dentasonic.ch
Switzerland www.dentasonic.ch

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Orto Trading Tomasz Włodarczyk
ul. Husarii 11B, 02-951 Warszawa
tel. 22 651-84-09, 604-593-940
email: biuto@ortotrading.com.pl
www.ortotrading.com.pl



Some of the products and designations mentioned in the text are patented or copyrighted. The absence of a special reference or the ® sign should not be interpreted as the absence of copyright protection. This publication is copyrighted. All rights, including those of translation, reprinting, and reproduction (also in the form of extracts) are reserved. No part of this publication may be reproduced or processed using electronic systems in any form or by any means (photocopying, microfilm, or other methods) without the editor's prior consent in writing. Colours and products subject to alterations. Printing errors excepted.